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


Brillant ist besser



Brillant® Brackets

Diskret und komfortabel



Perfekte Ästhetik
Brillant® Brackets sind aus zahnfarbenem Kunststoff und daher nahezu unsichtbar.



Einfach brillant
Eine spezielle Oberfläche schützt vor Verschmutzungen und sorgt für eine außergewöhnliche Farbstabilität.



Höchster Komfort
Brillant® Brackets bieten durch ihre aufgerauhte Basis exzellente Haftung und garantieren eine schonende Behandlung und kurze Tragezeiten.

FORESTADENT®


Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany
Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com

Brillant® Brackets


CE 0297




Das neue Material Polyoxymethylen zeichnet sich durch **außergewöhnlich hohe Farbstabilität und Abrasionsbeständigkeit** aus.

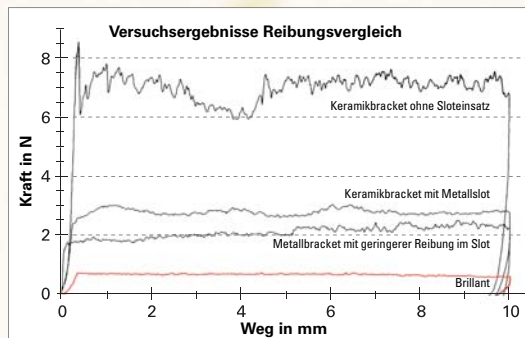


Reibungsvergleiche diverser Brackets und Brillant Brackets zeigen, daß ein NiTi-Bogen im Slot des Brillant Brackets extrem niedrige Reibungswerte zeigt: im Vergleich zum Slot eines guten Metallbrackets oder eines guten Keramikbrackets mit Metallslot ist die Reibung um 70% reduziert. Im Vergleich zu einem Keramikbracket ohne Metallslot sogar um 90%!

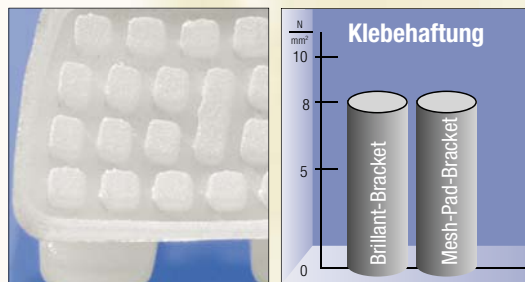

Exzellente Haftung auf dem Zahn, da die Bracketbasis zusätzlich zu den mechanischen Retentionsklötzchen aufgeraut ist. Forestadent Brillant- und Mesh-Pad Brackets besitzen die gleiche Haftung. Alle Mix- und Non-Mix-Produkte sind zum Kleben von Brillant Brackets geeignet. Ein zusätzlicher Plastikprimer ist nicht erforderlich.

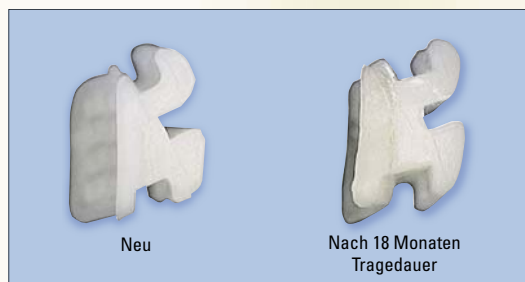

Problemloses Debonding: keine Schmelzausrisse und kein Zersplittern des Brackets.

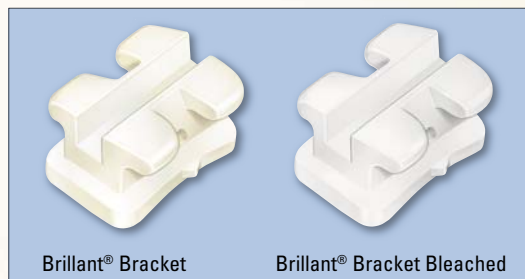

Brillant® Brackets sind erhältlich in Roth-System, Standard Ricketts-System und Standard-Edgewise System. **Brillant® Brackets Bleached** sind erhältlich in Roth-System. Für die Roth-Technik sind Eckzahn-Brackets mit stabilen Haken lieferbar.